


#COLUMN

## 下肢静脈疾患

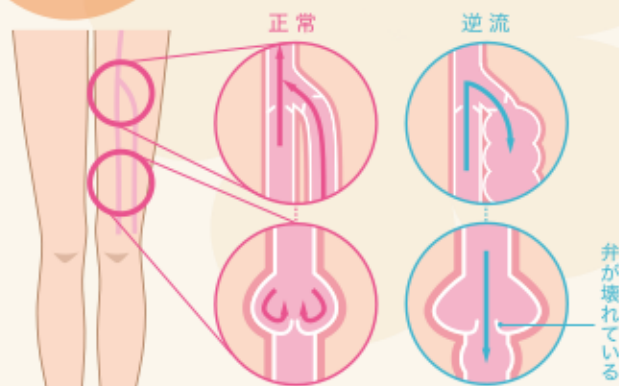

下肢の静脈に障害がおこると血液のうっ滞が発生。血液の逆流を防ぐ静脈弁が壊れると、血液が逆流してその下の静脈に血液がたまり、コブのようになります。



いますぐチェック！脚の健康診断。

- 脚の静脈が膨れる
- よくこむら返りを起こす
- だるい・重い・疲れやすい
- かゆみや湿疹がある
- ほてる・むくむ
- 皮膚が赤黒い

こんな方は**要注意**

- ✓ 女性に多い
- ✓ 長時間の立ち仕事をする
- ✓ 加齢と共に増加しやすい
- ✓ 妊娠・出産を経験した
- ✓ 親族に静脈瘤の方がいる

#SIZE

足首(B)、ふくらはぎ(C)の周径を確認し、2つのサイズにまたがる場合は、足首周径の中央値に近いサイズをお選びください。



参考サイズ(cm)

サイズ	足首-B	ふくらはぎ-C
SS	17.0-19.0	27.0-31.0
S	18.5-20.5	30.0-34.0
M	20.0-22.0	33.0-37.0
L	21.5-23.5	36.0-40.0
LL	23.0-25.0	39.0-44.0

< 商品概要 >

Re:vein

- ハイソックス クローズトゥ 3,520円(税込)
- ロングストッキング クローズトゥ 4,180円(税込)
- パンティーストッキング クローズトゥ 5,280円(税込)

Re:vein <sup>plus</sup>+

- ハイソックス クローズトゥ 3,850円(税込)
- ハイソックス オープントゥ 3,850円(税込)

医療機器届出番号：36B3X10002000008

■ 製造販売業者

東光株式会社

〒771-1153 徳島県徳島市応神町吉成字西吉成43番地

■ 販売業者

株式会社メディックス

〒771-1153 徳島県徳島市応神町吉成字西吉成42番地

お問い合わせ窓口 | 088-683-3456

■ お問い合わせ先

華ひらけ、働く女性たち。

# Re:vein

リヴェイン

Re:vein

- ハイソックス クローズトゥ
- ロングストッキング クローズトゥ
- パンティーストッキング クローズトゥ

Re:vein <sup>plus</sup>+

- ハイソックス クローズトゥ
- ハイソックス オープントゥ



一般医療機器  
弾性ストッキング

Medical Compression Stockings

Re:vein

圧迫力  
27hPa

Re:vein <sup>plus</sup>+

圧迫力  
33hPa



## もっと輝く私になりたい！

健康的で美しく、華やかな毎日を

多くの女性が悩んでいる脚のむくみ。脚を美しく保ちたいという女性の願いを叶えるため考案された弾性ストッキング『リヴェイン』。履き心地がよくおしゃれにも最適。歩く楽しさを実感してください。



#STORY2

なんだか脚が重い。

美しさは脚から

ずっと、脚がだるくて重い。毎日続くとつらい脚の不快感。その原因は、脚の血液の流れが悪いことでおこります。『リヴェイン』は脚の静脈血のうっ帯を軽減また予防し、静脈還流を促進します。

#STORY4



#STORY3

見つけた、私のパートナー。


ソフトな肌触りで着用しやすい

- ◆ デザイン  
ビジネス用、プライベート用  
どちらにも自然になじむデザインです。
- ◆ フィット感  
日本人に合うサイズ設計なので、しっかりフィット。  
キュッと引き締めます。
- ◆ 耐久性  
洗濯しても変わらず圧力を維持し、脚を美しく守ります。

種類	つま先形状	Re:vein 27hPa	Re:vein <sup>+</sup> 33hPa
ハイソックス	クローズ	● ベージュ ● ブラック	● ベージュ ● ブラック
	オープン		● ベージュ ● ブラック
ロングストッキング	クローズ	● ベージュ ● ブラック	
パンティーストッキング	クローズ	● ベージュ ● ブラック	

## HOW TO USE

◆ step1

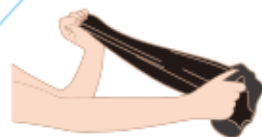

ストッキングの中に手を入れ、かかとの部分の手前まで裏返します。


履き方ワンツースリー！

◆ step2



入口を広げて、つま先を入れたら、かかとの方まで履いていきます。

◆ step3

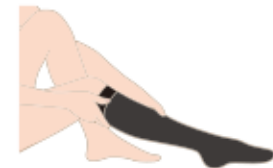

かかとをストッキングのかかと部分に合わせて、シワが出ないようにゆっくり引き上げます。