

Medical Support

通勤タイムや  
オフィスでも…。

心地よく暮らしたい  
を叶える  
弾性ストッキング

着物や浴衣にも…。

映画館や  
演劇場でも…。

小さなトイレ  
空間でも…。



Mild

plus

新発売

Mildパンティーストッキングの機能性に加え、マチあき型にすることで、  
お腹まわりのストッキングを頻繁に着脱せずにお過ごしいただけます。

佐藤佳代子先生（さとうリンパ浮腫研究所 代表）プロデュース

本製品は、弾性着衣の利便性を高め、暮らしのなかのお困りごとを解決するために開発されました。朝はぴったり着用できてもお手洗いの度にずれてしまったり、会社や映画館などの小さなトイレ空間で気を遣われたり、日常的に積み重なるころとお身体のご負担を軽減し”快適な心地よさ”に変えるイノベーション製品をぜひ実感されてみてください。



株式会社メディックス

お問合せ先

088-683-3456  
(受付時間：9:00～17:00)


住所：徳島県徳島市応神町吉成字西吉成42番地  
FAX：088-683-3455

<https://medicks.jp>



# プラス p l u s

## チエツクPoint

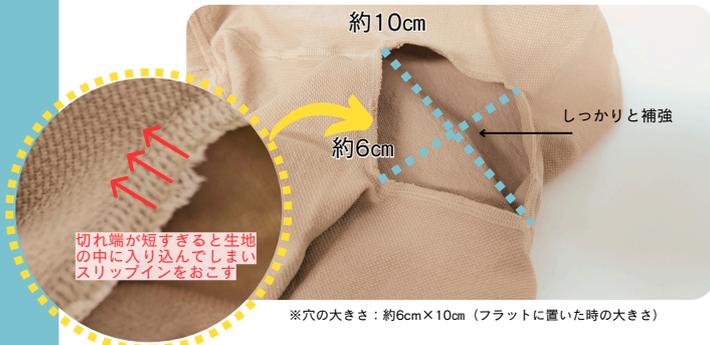

切れ端が短すぎると生地の中に入り込んでしまいスリッピンをおこす  
縁部分の切れ端はスリッピン予防の為に約2mm程の生地を残して縫製しております。  
端をハサミなどで切ると、その断面部分からゴム糸が縮んで生地の中に入りこみスリッピンが発生する場合がありますのでご注意ください。

※穴の大きさ：約6cm×10cm（フラットに置いた時の大きさ）

マチあき部分の縁を柔らかい生地で補強！！  
伸縮性を出し、動きに合わせて可動するため食い込みを軽減します。

※1フェムゾーンにむくみを感じられている方は、締め付けの強すぎないソフトガードルの併用をおすすめします。  
※2補強をしていない製品と比べると破れにくくなっておりますが、一定箇所に負荷がかかると破れる可能性があります。

### Point 1 マチあき型を採用

マチ部分をなくし穴を開けることで、弾性ストッキングを下ろさずにトイレをすることができます。

【着用方法】



本製品は素肌にそのままご着用いただけます。下着は本製品の※1上からご着用ください。

### Point 2 正しい装着

着用をする際は、マチあき縁部分が脚の付け根の際部分にきっちりと合うように着用してください。




隙間はないですか？



シワはありませんか？

### 【正しい装着位置】

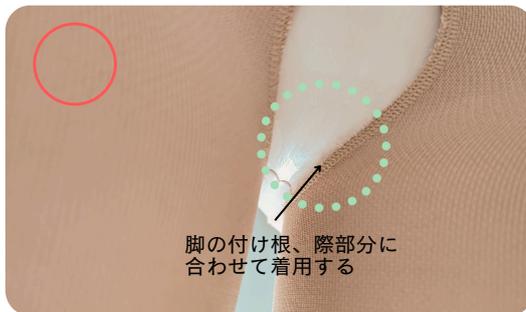

脚の付け根、際部分に合わせて着用する

※異常を感じたら、直ちに着用を中止し医師にご相談ください。

測定部位/サイズ	SS	S	M	L	LL
ウエスト	53.0-58.0	58.0-63.0	63.0-68.0	68.0-73.0	73.0-78.0
ヒップ	75.0-80.0	80.0-85.0	85.0-90.0	90.0-95.0	95.0-100.0
大腿上部 (G)	43.0-47.0	47.0-51.5	51.5-57.5	57.5-62.5	62.5-67.0
大腿中央 (F)	35.0-39.0	39.0-43.5	43.5-49.5	49.5-54.5	54.5-59.0
ふくらはぎ (C)	27.5-30.5	30.5-33.5	33.5-36.5	36.5-39.5	39.5-43.5
足首 (B)	17.0-19.0	18.5-20.5	20.0-22.0	21.5-23.5	23.0-25.0
股下長さ (踵-脚付根)	66.0-70.0(全サイズ共通)				

圧迫力 27-40hPa (20-30mmHg)  
サイズ 5サイズ展開  
カラー ベージュ  
素材 ナイロン、ポリウレタン

【Mild plus JANコード/商品コード】

SS / 4582559339368 / VA00040007  
S / 4582559339375 / VA00050007  
M / 4582559339382 / VA00060007  
L / 4582559339399 / VA00070007  
LL / 4582559339405 / VA00100007

希望小売価格 : 17,600円 (税込)  
医療機器届出名 : メディカルサポート Mild  
医療機器届出番号 : 36B3X1000200018